





































Reinigungs- und Desinfektionsplan (Stand 20.09.2017)

Was?	Wann?	Wie?	Desinfekt. mittel	Wer?
KTW & RTW außen & Fahrerkabine 	<ul style="list-style-type: none"> • bei Bedarf • oder wöchentlich (siehe Plan) 	reinigen / waschen 	 Reinigungs- und Putzmittel	 Das Schichtpersonal
KTW & RTW Inneneinrichtung Trage & Tragestuhl 	<ul style="list-style-type: none"> • nach I-Fahrt • oder wöchentlich (siehe Plan) 			 Das Schichtpersonal
hygienische Arbeitsflächen Rettungswache 	<ul style="list-style-type: none"> • nach Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten • oder wöchentlich (siehe Plan) 			 Das Schichtpersonal
Notfallkoffer Einsatztasche innen & außen 	<ul style="list-style-type: none"> • nach Gebrauch 			 Das Schichtpersonal
Beatmungsgerät Absauggerät EKG - Gerät 	<ul style="list-style-type: none"> • nach Gebrauch 			 Das Schichtpersonal
Blutdruckmessgerät Pulsoxymeter Perfusor 	<ul style="list-style-type: none"> • nach Gebrauch 			 Das Schichtpersonal
Laryngoskop mit Zubehör Beatmungsbeutel 	<ul style="list-style-type: none"> • nach Gebrauch 			 Das Schichtpersonal
Vakuummatratze Vakuumschiene Rettungstuch 	<ul style="list-style-type: none"> • nach Gebrauch 			 Das Schichtpersonal
Bettpfanne Urinflasche 	<ul style="list-style-type: none"> • nach Gebrauch 			 Das Schichtpersonal

Die Desinfektion nach einer I – Fahrt ist im Plan schriftlich festzuhalten.

Gezielte Flächendesinfektion: als Scheuer-Wisch-Desinfektion  **mit Incidin® Rapid**  0,75%, 30 Minuten

(bei Clostridien: Incidin® Rapid 2%, 60 Minuten) (bei offener TB: Incidin® Active 1 %, 30 Minuten)

Instrumentendesinfektionsmittel:  (Korsolex® plus 2%, 30 Minuten) 

Ansetzen der Desinfektionsmittellösungen: Wo möglich ist das automatische Dosiergerät auf der Wache zu nutzen. 